


Co byste měli vědět o používání práškového inhalátoru **NEXThaler®**

Hlavní části inhalátoru

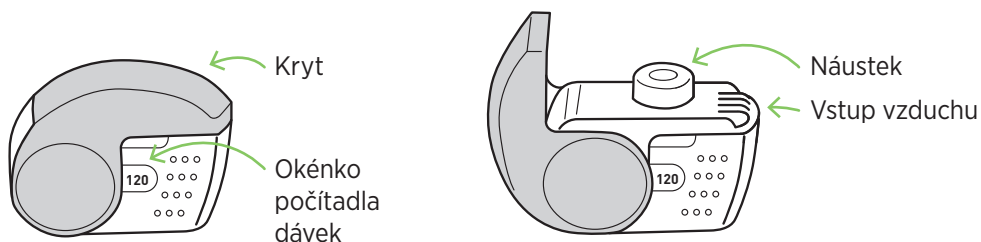

Systém trojité kontroly inhalace dávky vám
pomůže ověřit **SPRÁVNOU INHALACI** třemi smysly

SLUCH




Kliknutí uslyšíte jenom
v případě dostatečně
silné inhalace
a uvolnění dávky.

CHUŤ



Nasládlá chuť
v ústech (nebo pocit
prášku v ústech) jenom
po úspěšné inhalaci.

ZRAK

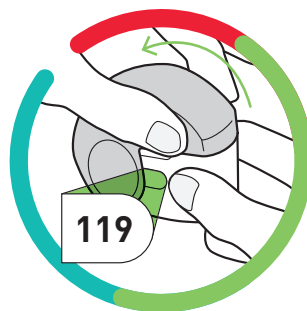

Počítadlo se posune
a odečte jenom
po úspěšné inhalaci.

Důležité informace:

Počítadlo dávky se posune po správné inhalaci a zavření krytu.

Bez správné inhalace se počítadlo dávky po zavření krytu neposune.


Při inhalaci vždy sedněte nebo vzpřímeně stůjte.

Při inhalaci nikdy nezakrývejte vstup vzduchu.

Návod na inhalaci práškového inhalátoru **NEXThaler®**

1. Otevřete

- Úplně otevřete kryt.
- Hluboce vydechněte mimo inhalátor.

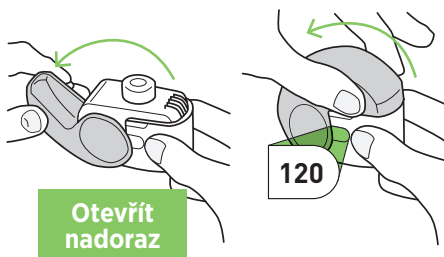


2. Inhalujte

- Přiložte inhalátor k ústům a sevřete rty okolo náustku.
- Hluboce a silně se nadechněte a sejměte inhalátor z úst. Zadržte dech na 5-10 sekund nebo co nejdéle to bude možné.
- Pomalu vydechněte. Nikdy nevydechujte do inhalátoru.

3. Zavřete

- Dejte inhalátor zpět do svislé polohy a úplně zavřete kryt.
- Zkontrolujte, zda počítadlo dávek ukazuje číslo o jedno nižší než před inhalací.

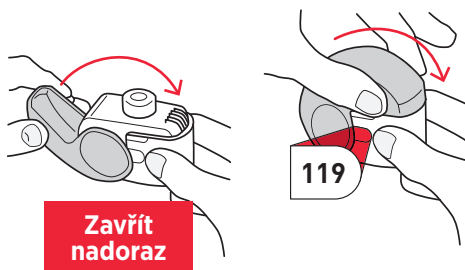

Pro další dávku opakujte kroky 1–3.

Čištění inhalátoru

Za normálních okolností není třeba inhalátor čistit.

V případě potřeby můžete inhalátor vyčistit suchým hadříkem nebo papírovým kapesníkem.

Zabraňte kontaktu inhalátoru s vodou a vlhkostí.